

How to Wear Full Face Masks Properly

1



Fully loosen all head straps. Bring respirator close to your face with one hand.

2



While holding the respirator with one hand, pull the straps over your head.

3



Tighten the bottom straps until you feel it is secured.

4



Tighten the top straps until you achieve a secure fit.

5

Positive Pressure User Seal Check



Place the palm of your hand over the exhalation valve cover and exhale gently, the mask should bulge slightly.


6

Negative Pressure User Seal Check




Place the palms of your hands over the cartridges of the filters and inhale, it should collapse slightly.

7

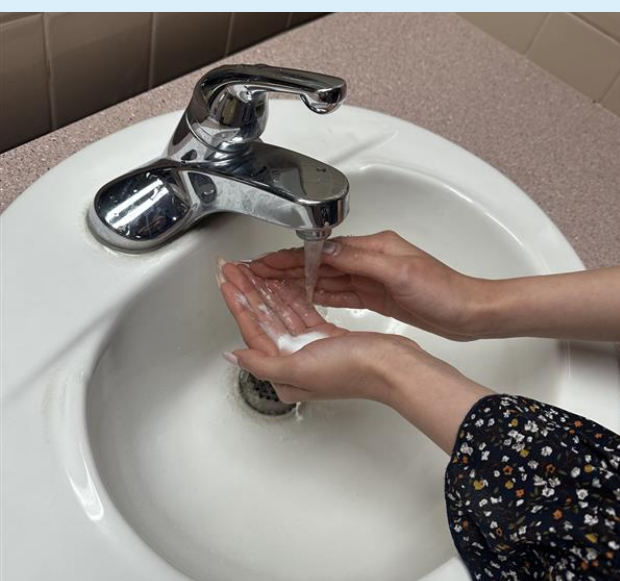

Wash your hands properly and immediately after you remove the respirator.

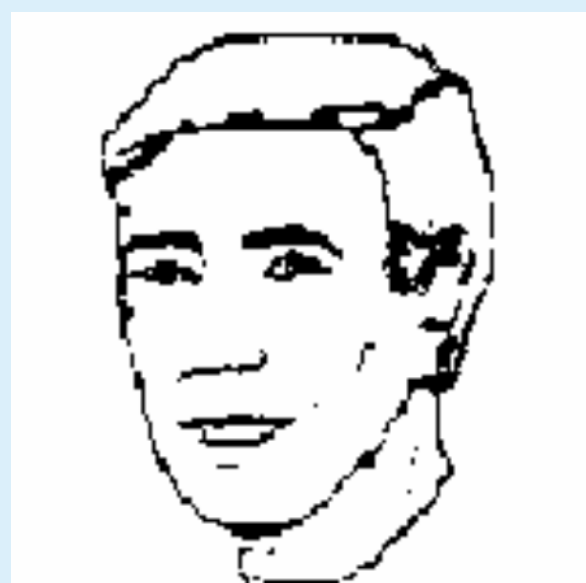

Face must be clean shaved at all times. Long hair should be pulled back on a ponytail.

Cómo usar un respirador de cara completa correctamente

1



Afloje por completo todas las correas para la cabeza. Acerque el respirador a su cara con una mano.

2



Mientras sostiene el respirador con una mano, pase las correas por encima de su cabeza.

3



Apriete las correas de la parte de abajo hasta lograr un ajuste seguro.


4



Apriete las correas superiores hasta lograr un ajuste seguro.

5

Verificación del sello de presión positiva

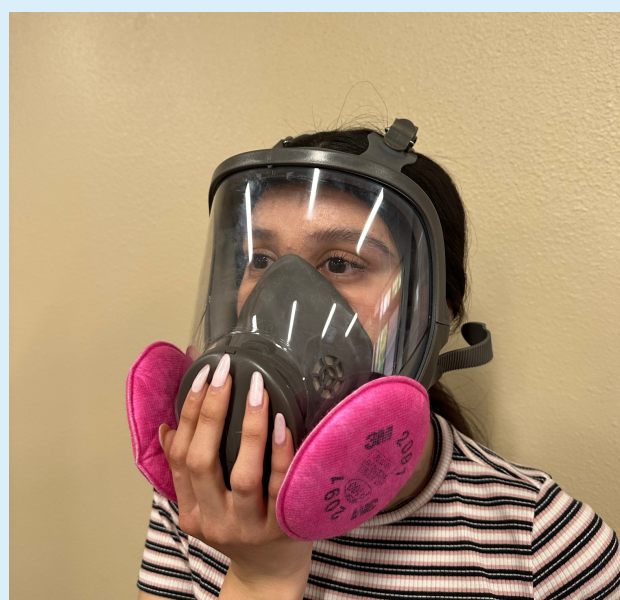

Coloque la palma de su mano sobre la cubierta de la válvula de exhalación y exhale suavemente, la máscara debe inflarse ligeramente.


6

Verificación del sello de presión negativa




Coloque las palmas de su mano sobre los cartuchos de los filtros e inhale, debe sentir una ligera succión.

7

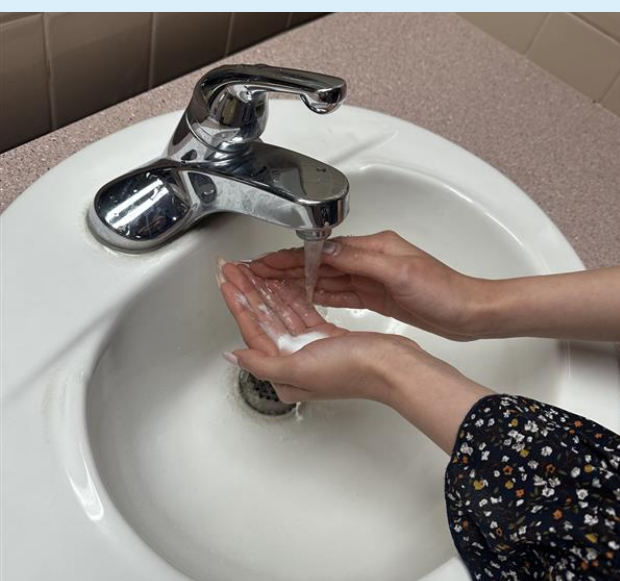

Lávese las manos correctamente e inmediatamente después de quitarse el respirador.

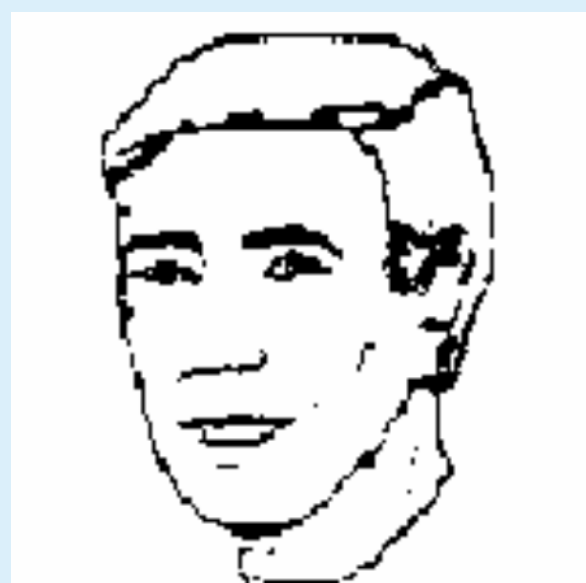

La cara debe estar bien afeitada en todo momento. El cabello largo debe recogerse en una cola de caballo.